

Istruzione per il hoof casting

- Consigli utili per l'utilizzo dei ganci di fissaggio Cast -

Quando si utilizzano i ganci di fissaggio Cast?

I ganci di fissaggio Cast vengono utilizzati per determinate diagnosi, ad esempio quando il cavallo presenti problemi con la scatola cornea e necessiti di assoluta stabilità e sostegno e non è possibile applicare una protezione dello zoccolo inchiodata. L'applicazione di una ferratura cast richiede competenze specifiche. Per evitare possibili danni legati all'immobilità, è cruciale individuare il momento opportuno per la remobilizzazione. Di solito, il meccanismo dello zoccolo e l'apparato locomotore del cavallo collaborano in modo impeccabile. Tuttavia, l'esclusione di singole parti potrebbe generare sovraccarichi in altre zone. La decisione finale però spetta sempre al maniscalco in loco, eventualmente in collaborazione con il veterinario.




Quali sono i vantaggi di questo sistema?

- Questo sistema consente di applicare la protezione dello zoccolo senza inchiodare o incollare.
- Durante il processo della ferratura, lo zoccolo (sensibile e potenzialmente doloroso) non subisce le percussioni dei colpi di martello.
- Durante l'utilizzo, il bendaggio Cast non è a contatto con la superficie inferiore della ferratura e quindi non si consuma; di conseguenza la ferratura può rimanere sullo zoccolo più a lungo.

Barra di ganci di fissaggio

- Una barra Cast è composta da 9 ganci di fissaggio Cast.
- Per il fissaggio di una ferratura Duplo occorrono 6 ganci di fissaggio.

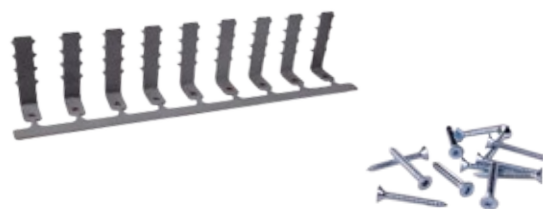

Le viti

- Per montare i ganci sulla ferratura consigliamo le seguenti viti: DIN 7982 / ISO 7050 viti a testa piana svasata 4,2mm x 19mm.
- Per montare i ganci su una ferratura occorrono 6 viti
- Nel nostro shop online troverete le viti corrispondenti in combinazione con la barra Cast (Kit di ganci di fissaggio).

Il bendaggio Cast

- Il bendaggio Cast (lana di vetro) si indurisce se esposto all'umidità. Fate quindi attenzione a non danneggiare l'imballaggio non appena il bendaggio venga esposto all'aria, può indurirsi a causa dell'umidità dell'aria.
- Nel nostro shop online troverete due diverse taglie: 5cm x 3,6m e 7,5cm x 3,6m.
- Di solito occorre un rotolo per ogni zoccolo.



Le ferrature adatte

I ganci di fissaggio Cast possono essere abbinati a qualsiasi ferratura composta, compresi i modelli a punta aperta. Questo sistema può essere particolarmente utile per i cavalli che ad esempio soffrono di laminite. Si sconsiglia l'uso in combinazione con le ferrature puramente in plastica, poiché la vite non si inserisce saldamente in mancanza della struttura interna di metallo.

Caratteristiche particolari in base alla taglia

I ganci di fissaggio Cast disponibili nella nostra gamma sono perfettamente adatti a tutti i modelli a punta aperta; per gli altri modelli, a partire dalla taglia 142mm, attualmente sono necessarie modifiche manuali.

Ulteriori informazioni e istruzioni di sicurezza:

www.duplo-frank.de/it/istruzioni-ferratura

www.duplo-frank.de/it/sicurezza



<https://youtu.be/KAABjB7GN8w>




(1) La preparazione

- In sostanza, il **pareggio dello zoccolo** prima dell'applicazione viene eseguito analogamente al pareggio dello zoccolo prima dell'applicazione di qualsiasi altra ferratura. È importante che l'esecuzione del pareggio avvenga a regola d'arte.
- Scegliere il modello che meglio si adatti allo zoccolo (forma e taglia), alla temperatura (Standard o Extra) e all'utilizzo previsto (modello).
- Dopodiché bisogna adattare la ferratura alla forma dello zoccolo per mezzo di una smerigliatrice angolare oppure una smerigliatrice a nastro.
- Per il perfetto allineamento, si consiglia di rimuovere i dentini sull'inserito dentellato della ferratura. Questo vale anche per i dentini morbidi del modello Nailless.

(2) Montare i ganci di fissaggio sulla ferratura

- Inserire la vite dal lato dello zoccolo in un foro per i chiodi della ferratura e posizionare il gancio di fissaggio sulla vite dal lato inferiore della ferratura.
- Stringere la vite con l'avvitatore fino a svasarla nella zona del orlo plantare
- Accorciare le viti sporgenti con la smerigliatrice angolare o a nastro. Durante questo processo, assicurarsi di adottare le adeguate precauzioni di sicurezza e considerare che potrebbero verificarsi delle scintille.

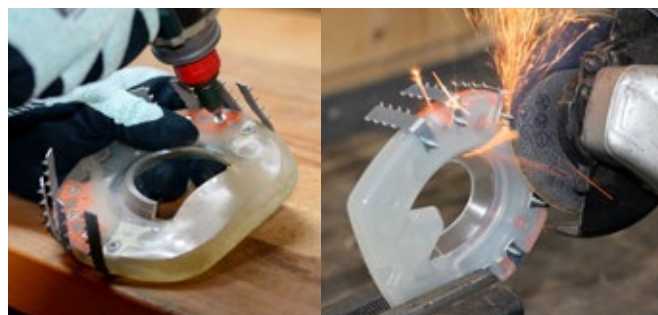

(3) L'applicazione della ferratura Cast sullo zoccolo

- Una volta che tutti i ganci di fissaggio cast sono stati montati alla ferratura, posizionare quest'ultima sullo zoccolo. Se tutti i passaggi di preparazione sono stati eseguiti correttamente, la ferratura dovrebbe rimanere da sola nella corretta posizione sullo zoccolo.
- Una volta che il ferro di cavallo è posizionato ottimamente sullo zoccolo, avvolgere il bendaggio Cast.
- Una volta completate queste operazioni, è possibile appoggiare lo zoccolo sul terreno e far indurire completamente il Cast. Il margine coronale e la zona dei glomi non devono essere coperti!



(4) Rimuovere la ferratura cast

Utilizzare una taglierina a gancio/cutter e seguire attentamente le relative istruzioni di sicurezza. Si sconsiglia vivamente l'uso di un coltello normale poiché potrebbe provocare lesioni. Tagliare con cautela il bendaggio cast nella zona della punta, procedendo dall'alto verso il basso. A questo punto, la rimozione del bendaggio cast risulta facile. Per farlo, è sufficiente tirare delicatamente il bendaggio.



Osservare le istruzioni di sicurezza applicabili ai nostri prodotti. Ulteriori dettagli sui nostri ganci di fissaggio Cast sono disponibili online: www.duplo-frank.de/it/senza-chiodi/ganci-fissaggio




Se ha delle domande o delle sfide individuali, il nostro servizio clienti è a Sua completa disposizione!

Ferrature Composite Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
94143 Grainet, Germania

Tel.: +49 (0) 8585/96926-0
Fax: +49 (0) 8585/96926-119

 [duplo_composite_horseshoes](https://www.instagram.com/duplo_composite_horseshoes)

 Duplo Composite Horseshoes

 info@duplo-frank.de



www.duplo-frank.de



Ultimo aggiornamento: 06/2024