

Los diferentes modelos de la herradura Duplo con pinza abierta fueron desarrollados en cooperación con Wolfgang Busch para el tratamiento de laminitis crónica. En la práctica se ha comprobado que los modelos con pinza abierta no solo son útiles en caso de laminitis sino también para otras indicaciones terapéuticas.

Rejilla integrada sintética

Todos modelos Duplo con pinza abierta tienen una rejilla integrada de material sintético y se pueden usar en combinación con un material de relleno líquido o sólido. El material de relleno sobrante puede salir por las aberturas de la rejilla para que no haya una presión dolorosa sobre la suela sensitiva.

Protección antideslizante

Las herraduras Duplo con pinza abierta tienen la suela un poco perfilada; por eso de principio son muy antideslizantes. Sin embargo hay situaciones en las que el uso de ramplones puede ser útil. Por lo tanto ofrecemos un modelo con dos roscas estables en la zona de los talones.

Ahorro de peso

La herradura Duplo con pinza abierta (sin pestañas laterales y roscas) pesa menos que una herradura convencional de pinza abierta sin barra con una plantilla ligera de material sintético. De esta manera tanto el aparato locomotor como la pared son descargados.

Pinza abierta

La zona de pinza abierta permite una rodadura precipitada del casco en el suelo; de ese modo las fuerzas de apalancamiento en la zona delantera del casco son minimizadas. Además, si necesario, se puede acortar más considerablemente la pinza comparado con una herradura habitual.

Barra en forma anatómica

La barra tiene la forma exacta del borde dorsal de la tercera falange. Así, a diferencia de una barra recta, no haya una presión puntual sobre el borde de la tercera falange, con tal que la herradura fuera colocada correctamente en el casco.

Fijación fiable

Dependiente del modelo, dos pestañas laterales aseguran que la herradura no se tuerca en el casco.

Claveras flexibles

Las claveras rectangulares están posicionadas a 90 grados a la línea blanca. Así se puede colocar los clavos más hacia el interior o hacia el borde del casco y reaccionar individualmente a formas irregulares de la muralla.

Modificaciones

Gracias al material sintético que generosamente sobresale el núcleo metálico, se puede simplemente ajustar la herradura Duplo con pinza abierta a la forma individual del casco con una amoladora angular o de banda. También se puede lijar una lumbré levantada en la pinza o en las talones.

Núcleo metálico estable

El núcleo metálico está muy estable y rígido. Las dos ramas también permanecen en su posición y apoyan al casco exactamente donde está necesario.



Modelos

Nuestro surtido de herraduras con pinza abierta comprende tres modelos que están disponibles entre 110mm y 170mm.



herradura con pinza abierta



herradura con pinza abierta con pestañas laterales



herradura con pinza abierta con pestañas laterales y roscas

La talla de las roscas depende de la talla de la herradura: Las herraduras hasta 130mm tienen roscas M8, las herraduras a partir de 134mm tienen roscas M10.

En nuestra tienda en línea encuentra no sólo los modelos Duplo con pinza abierta sino también el equipamiento apropiado. En el sector terapéutico en particular puede ser necesario herrar sin clavos. Por lo tanto tenemos varios sistemas de pegar en nuestro surtido. Si necesita una protección antideslizante adicional, puede usar nuestros ramplones.



Ganchos Cast

Si el estuche córneo necesita descanso y estabilidad, puede fijar la herradura Duplo con pinza abierta con nuestros ganchos cast y una cinta sintética.

Durante el uso, la cinta sintética no cubre el parte inferior de la herradura y por eso no se desgasta.



www.duplo-frank.de/es/sin-clavos/ganchos-cast



Lengüetas de pegar

En combinación con las herraduras con pinza abierta recomendamos sobre todo las lengüetas de pegar RB-Carbon „powered by Duplo“.



www.duplo-frank.de/es/sin-clavos/rb-carbon



Ramplones

Hay ramplones apropiados de 8mm para el modelo Duplo con pinza abierta con roscas. Enroscado, los ramplones están sumergidos cerca de 3mm en la rosca; entonces, la altitud efectiva está un poco reducida.



www.duplo-frank.de/es/productos-antideslizantes

Si quiere usar la herradura Duplo con pinza abierta para el tratamiento de laminitis crónica, le recomendamos urgentemente la participación en un curso práctico y la cooperación con el veterinario responsable. ¡Cada herradura solamente es tan eficaz como la persona que la aplica!

Por favor tiene también en cuenta nuestra instrucción general de herraje y la información de seguridad.

¡Le deseamos mucho éxito con nuestros modelos Duplo con pinza abierta y esperamos que ayuden en la convalecencia de vuestro caballo!

Visite nuestra página web para más informaciones:
www.duplo-frank.de/es/herraduras-compuestas-duplo/herradura-con-pinza-abierta



www.duplo-frank.de

Herraduras Compuestas Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Tel.: +49 (0)8585/96926-0
Fax: +49 (0)8585/96926-119
info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

Última modificación: Junio 2020

DUPLO

Herraduras con pinza abierta

